


BRUGSANVISNING MJ-EASY TRAVEL SELEN

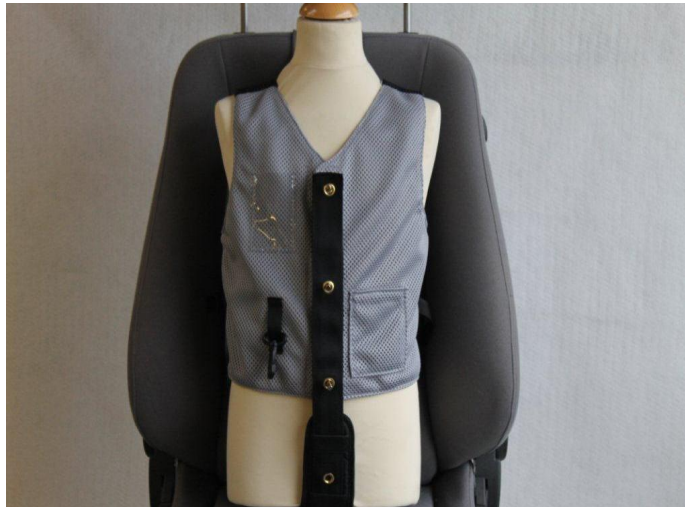

Det er vigtigt at gennemlæse denne brugsanvisning inden montering og ibrugtagning af MJ-Easy Travel selen, samt at de nævnte råd og anvisninger om sikkerhed og brug følges for at opnå den optimale af selen udnyttelse.

MJ-Easy Travel selen er konstrueret til anvendelse som positioneringssele i et køretøj, -bil, bus, manuel betjent kørestol. m.v.

MJ-Easy Travel selen anvendes i forbindelse med et sæde med ryglæn, der er fastgjort til køretøjet.

MJ-Easy Travel selen anvendes til børn og voksne.

MJ-Easy Travel selen er IKKE en sikkerhedssele, men en positioneringssele der sikrer personens rette placering på sædet.

Anvendes MJ-Easy Travel selen til andet formål end beskrevet, gælder CE-mærkning og garanti kun ved fabrikantens skriftlige godkendelse.

Indholdsfortegnelse:

1. CE-Overenstemmelseserklæring.
2. Anvendelse.
3. Anvendelse sammen med selepude, selepude med ryglæn og autosæde.
4. Vedligeholdelse.
5. Garanti.


1. EU-Overensstemmelseserklæring

EU-overensstemmelseserklæring	CE
MJ Autosadelmager Holmstrupvej 250 8210 Århus V	
Erklærer hermed, at MJ-Easy Travel selen. er fremstillet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 af 9. marts 2016. kat.II.	
MJ- Easy Travel selen er konstrueret til positionering af børn og voksne, og beregnet som støtteseje til positionering af personen i et fast autosæde eller som støtte i manuel betjent kørestol.	
Endvidere er produktet underlagt følgende standarder og cirkulærer: DS/EN 13688:2013 Generelle krav til ergonomi, ældning, størrelser og mærkning af beskyttelsesbeklædning. DS/EN 13210:2004 Børneseler og andre lignende produkter-Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder DS/EN 365:2004 Personlige værnemidler og faldsikringsmaterial: Generelle krav til brugsanvisninger, vedligeholdelse, periodisk eftersyn, reparation, mærkning og pakning. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning m.v. af personlige værnemidler BEK. nr. 210 af 14/03/2018.	
8210 Århus V, den 18.03.2020. Morten Jespersen	

2. Anvendelse:



Selen er udformet som en vest, personen iklædes vesten og vesten lukkes.

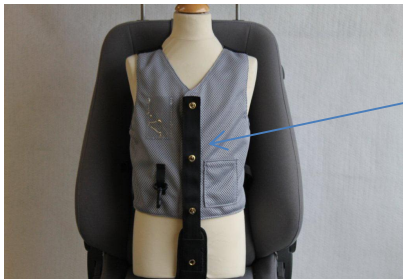

Skridtgjorden knappes sammen med vestens knapper på vestens forside.



Skridtgjorden med lås stikkes mellem sædet og ryglænet, og topgjorden der er fastgjort til vesten, lægges over sædets ryg



Placer personen i sædet og indstil skridtgjorden omkring personen og lås snaplåsen.

BRUGSANVISNING MJ-EASY TRAVEL SELEN



Læg de 2 vandrette gjorde, der er fastgjort til vesten, omkring ryglænet, -indstil og lås disse.



Personen er nu positioneret i sædet. Kontroller at selen er lukket og finindstillet.

1. Indstil skridtgjorden således, at skridtgjorden ikke er stram. Indstillingen foretages på bagsiden af sædet og må gerne være således, der kan lægges en flad hånd under gjorden.
2. Indstil de 2 vandrette gjorde med lås stramt omkring sædet, justering foregår på bagsiden af ryglænet.

Sikkerhed:

Når personen er placeret og positioneret med MJ-Easy Travel selen, lægges køretøjets sikkerhedssele på personen, efter gældende regler for transport af børn og voksne.

Efterlad aldrig personer uden opsyn, når de er positioneret med MJ-Easy Travel selen.

Sammen med MJ-Easy Travel selen medfølger en selekniv der anvendes ved akut behov for person frigørelse fra selen. Kniven anvendes til overskæring af selegjorde og skal opbevares et sikkert- og let tilgængeligt sted.

3. Anvendelse sammen med selepude, selepude med ryglæn og autostol.



Sædepude

Sædepuden placeres på køretøjets sæde
MJ-Easy Travel selen placeres omkring køretøjets sæde, og under køretøjets sikkerhedssele, som vist i afsnit 2.



Sædepude med ryglæn

Sædepude med ryglæn placeres på køretøjets sæde
MJ-Easy Travel selen placeres omkring køretøjets sæde, under køretøjets sikkerhedssele, som vist i afsnit 2.



Autostol

Autostolen placeres og fastgøres som beskrevet i dennes brugsanvisning, dette kan ske ved anvendelse af køretøjets sikkerhedssele eller Isofix-beslag. MJ-Easy Travel selen placeres under Autostolens godkendte sikkerhedssele og fastgøres omkring køretøjets ryglæn.

4. Vedligeholdelse.

Daglig vedligeholdelse inden ibrugtagning, efterse MJ-Easy Travel selen for skader og slitage, kontroller også at låsene fungerer.

MJ-Easy Travel selen er fremstillet af polyamid gjorde og en vest udført af blødt åndbart 100% polyester stof på bagsiden og 100% polyester net vævet stof på forsiden.

Vesten kan vaskes ved 40°C, anvend ikke tørretumbler til tørring efter vask.

Ved skader eller slitage skal MJ-Easy Travel selen sendes til reparation hos leverandør.

Bortskaffelse.

Når MJ-Easy Travel selen ikke længere skal anvendes, kan denne sendes til destruktion for genanvendeligt jernaffald og brændbart stof.

4. Garanti.

Fabrikantens garanti omfatter fremstilling, materialer og funktion af det leverede udstyr. Garantien er gældende, når udstyret anvendes som beskrevet i brugsanvisning og til det formål hvorunder udstyret er leveret.

Garantien omfatter udbedring af fejl og mangler på det leverede udstyr og ikke evt. følgevirkninger forårsaget af disse.

Alle reparationer og udskiftninger af komponenter i garantiperioden må ikke foretages uden forudgående tilladelse og godkendelse af fabrikanten.

Garantiperioden er efter gældende lovgivning eller som aftalt i ordrebekræftelse.