

**etac**<sup>®</sup>  
Creating Possibilities



R82<sup>®</sup>

# R82 Meerkat

Læring gjennom bevegelse

# R82 Meerkat

Et enkelt ståstativ med sentersøyle som bidrar til en oppreist stilling og læring gjennom bevegelse.

## Egenskaper

Meerkat består av en bunnplate og en søyle. I standard-utgaven brukes Meerkat med fotsandaler, kne- og hoftestøtter. Tilbehøret monteres raskt og enkelt på og av søylen for individuelle justeringer.

Det store utvalget av tilbehør gjør det mulig å få hofte- og bryststøtte, eller montere et bord for ekstra støtte. Tilbehøret monteres raskt og enkelt på og av søylen for individuell justering.

### Beskrivelse

### Art.nr

Meerkat

Str. 1, blå 31870011-1

Str. 1, rosa 31870011-2

Str. 2, grå 31870022

Str. 3, grå 31870023

### Bekkenstøtte

Bekkenstøtten gir utmerket og tett støtte i søyle-systemet som bidrar til rask og sikker justering. Dette er nyttig i overførings situasjoner der man raskt kan sikre bekkenet. Søyle-systemet er en ideell løsning for å holde brystet symmetrisk uten behov for ekstra hjelp.

### Knestøtte

Knestøtten gir behagelig støtte både foran og bak. Her er det rask og sikker tilpasning gjennom klikksystem. Knestøttene har justerbar vinkel og kan enkelt posisjoneres fremover, bakover og til sidene samtidig som barnet står i stativet.

### Tilpasninger

Modulære komponenter kan raskt og enkelt klikkes på og av den sentrale søylen, for å tilpasses barnets utviklende behov.

### Bunnplate

Bunnplaten er fundamentet for sentralsøylen som tillater enkel montering av alle støttene gjennom et enkelt klemmesystem

### Fotsandaler

Posisjonen og rotasjonen på fotsandalene kan enkelt justeres. Fotsandalene kan tilpasses alle fotstørrelser, sko og ortoser.



# Tilbehør som bidrar til god støtte og bevegelse

Ved hjelp av det store utvalget av tilbehør er det mulig å få hofte- og bryststøtte eller montere et bord for ekstra støtte. Det finnes også en gyngende som enkelt monteres under bunnplaten, selv med barnet stående i Meerkat.



Forfra med alt tilbehør



Bakfra med enkelt tilbehørsoppsett

## Mange muligheter

### Bryststøtte

Bryststøtten gir god og tett støtte i søyle-systemet, som muliggjør rask og sikker justering i små trinn. Dette er svært nyttig i situasjoner med forflytning, da brystet enkelt kan sikres raskt. Søyle-systemet er en ideell løsning for å holde brystet symmetrisk uten behov for ekstra hjelp.

### Gynge

Ved å montere gyngen under bunnplaten kan man utfordre kontrollen over overkroppen som ikke støttes av ståstativet.



Gyngen gir barnet nye og unike muligheter til å skape og reagere på bevegelse. Dette bidrar til å forbedre kontrollen over overkroppen og reduserer stillesittende tid.

### Bordplate

Bordplaten gir mange muligheter for lek, interaksjon og daglige aktiviteter. Den kan brukes til funksjonelle oppgaver, samtidig som den gir støtte til overkroppen.

## Mål og vekt

Meerkat mål	Størrelse 1	Størrelse 2	Størrelse 3
Bredde (A)	445 mm	670 mm	670 mm
Totalbredde	525 mm	780 mm	780 mm
Lengde (B)	595 mm	800 mm	800 mm
Totallengde	640 mm	860 mm	860 mm
Høyde (C)	375-750 mm	500-1000 mm	650-1300 mm
Vekt	9 kg	15,3 kg	15,8 kg
Barnets lengde	700-1050	950-1350	1170-1800
Max. brukervekt	20 kg	65 kg	90 kg
Omkrets hofte	450-600 mm	600-740 mm	700-950 mm
Omkrets bryst	450-600 mm	600-740 mm	700-950 mm
Statisk stabilitet sidelengs	10°	10°	10°
Statisk stabilitet fremover	10°	10°	10°
Statisk stabilitet bakover	10°	10°	10°

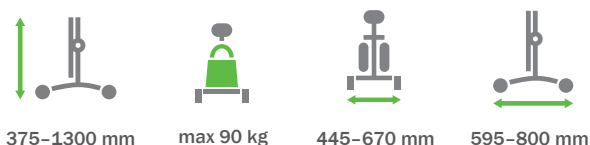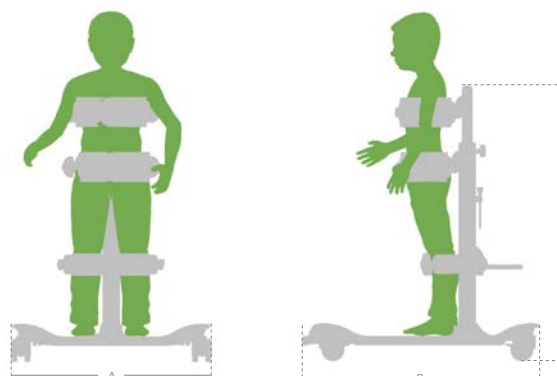

## Tilbehør



### Bryststøtte

Polstret støtte med trinnvis justering. Finnes i tre størrelser. Omkrets i mm.

Small	450-600 mm	31869480
Medium	600-740 mm	31869481
Large	700-950 mm	31869482
XL	900-1100 mm	31869483
XXL	1000-1200 mm	31869484



### Hoftestøtte

Polstret støtte med trinnvis justering. Finnes i tre størrelser. Omkrets i mm.

Small	450-600 mm	31869240
Medium	600-740 mm	31869241
Large	700-950 mm	31869242
XL	900-1100 mm	31869243
XXL	1000-1200 mm	31869244



### Knestøtte

Justerbare i bredde, høyde og dybde. Trinnvis justering. Finnes i tre størrelser. Omkrets i mm.

Small	189-251 mm	31869840
Medium	251-290 mm	31869841
Large	290-390 mm	31869842



### Fotsandal

Monteres og justeres med unbraconøkkel på baksiden av fotsandalen.

Small (str 1)	31869490
Bredd: bak 60-75 mm, fram 95-110 mm	
Medium (str 2)	31869491
Bredd: bak 65-80 mm, fram 100-145 mm	
Large (str 2)	31869492
Bredd: bak 85-95 mm, fram 120-165 mm	



### Gyng

Stl 1	31118598-1
Stl 2-3	31117047-1



### Bord

Finnes i to størrelser. For bruk ved magestøtte.

Plast, grå.	
Str 1 utskåring 280 mm	31869485
Str 2 utskåring 357 mm	31869485



### Justeringsfeste for bryst- /hoftestøtte

Gir mulighet til å justere bryst- og hofte-støtte i dybdeled eller i dybdegående retning.

One size	31124025
----------	----------




### Justeringskit knestøtte

Håndtak for enkel justering av knestøttene uten verktøy. 2 stk håndtak per enhet.


One size	31124026
----------	----------

# Hvordan måle?

En enkel guide som hjelper deg med å velge riktig størrelse på Meerkat og tilbehør.

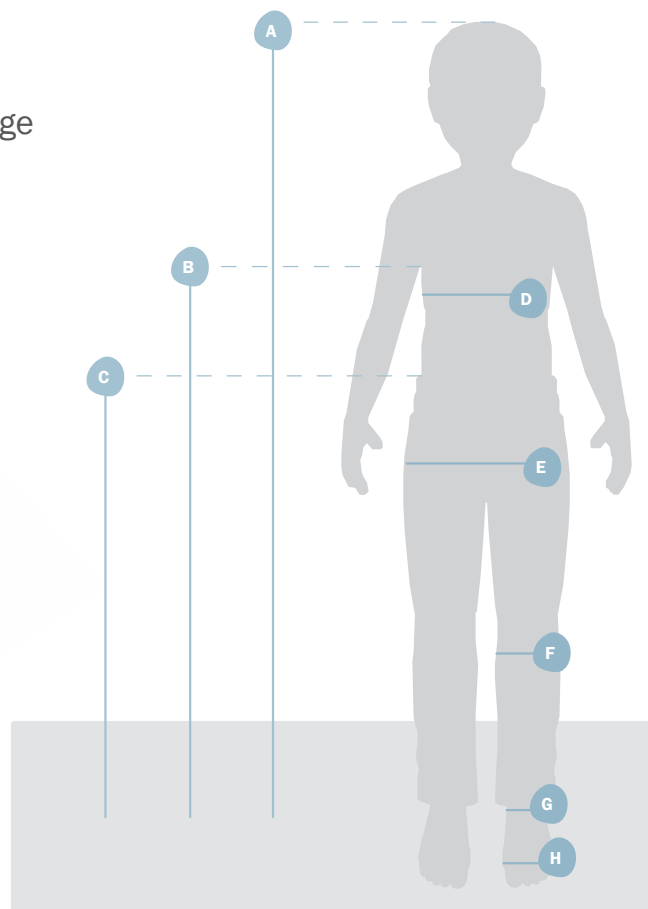

## Målvæddning

Standard produkt	Meerkat str. 1	Meerkat str. 2	Meerkat str 3	
Ca. alder	1-4 år	4-10 år	6-18 år	
 Max vekt	20 kg (44 lb)	65 kg (143.3 lb)	90 kg (198.4 lb)	
A Ca. høyde	700 - 1050 mm (27½ - 41¾")	950 - 1350 mm (37½ - 53¾")	1170 - 1800 mm (46 - 70¾")	
B Max armhulehøyde	400 - 750 mm (15¾ - 29½")	720 - 1000 mm (28¾ - 39¾")	840 - 1300 mm (33 - 51¾")	
C Størrelse opp til bekken	350 - 550 mm (13¾ - 21¾")	500 - 800 mm (19¾ - 31½")	650 - 1050 mm (25½ - 41¾")	
Accessories	Small	Medium	Large	X-Large
D Omkrets bryst	450 - 600 mm (17¾ - 23½")	600 - 700 mm (23½ - 27½")	700 - 900 mm (27½ - 35½")	900 - 1100 mm (35½ - 43¾")
E Omkrets høyde	450 - 600 mm (17¾ - 23½")	600 - 700 mm (23½ - 27½")	700 - 900 mm (27½ - 35½")	900 - 1100 mm (35½ - 43¾")
F Omkrets kne	189 - 251 mm (7½-10")	251 - 290 mm (10-11½")	290 - 390 mm (11½-15¼")	-
F Bredder kne	60 mm (2¾")	80 mm (3¼")	107 mm (4")	-
G Bredder hæl	60 - 75 mm (2¼ - 3")	65 - 80 mm (2½ - 3¼")	85 - 95 mm (3¼ - 3¾")	-
H Bredder fremre fot	95 - 110 mm (3¾ - 4¼")	100 - 145 mm (4 - 5¾")	120 - 165 mm (4¾ - 6½")	-

## Standard: Bunnplate og søyle




Baunplate og søyle



Søyle montert på bunnplate



Size 1 - lys blå

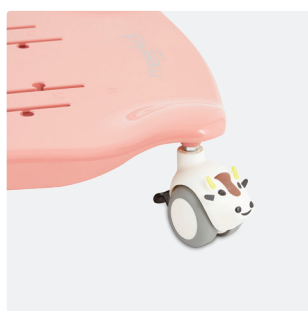

Size 1 - lys rosa



Size 2+3 - antracit

## Tibehør



**Bryst støtte**  
86948x



**Bekkenstøtte**  
86924x



**Knestøtte**  
86984x



**Sandaler**  
86949x-x



**Gynge**  
118598-1, 117047-1



**Bordplate**  
869485, 869486



**Justeringsfeste for bryst-og hoftestøtte**  
124025



**Justeringskit knestøtter**  
124026



Vi ønsker at alle skal kunne leve et fritt og uavhengig liv og følge sine drømmer,  
uavhengig av fysiske omstendigheter.

For nyheter og løpende produktoppdateringer - besøk [www.etac.no](http://www.etac.no)

Etac AS  
P.boks 249 - 1501 Moss  
Telefon: 815 69 469  
E-post: [hovedkontor.norge@etac.com](mailto:hovedkontor.norge@etac.com)  
[www.etac.no](http://www.etac.no)

**etac**<sup>®</sup>  
Creating Possibilities