

etac[®]

Creating Possibilities



molift[®]

Molift Transfer Pro

Optimaliseert zittende transfers en bevordert mobiliteit

Molift Transfer Pro

Molift Transfer Pro draagt bij aan een veilige en gezonde zorgomgeving voor zowel de cliënt als de zorgverlener, het is de ideale oplossing voor zorginstellingen ziekenhuizen, verpleeghuizen én de thuiszorg.

Comfortabele en veilige transfer

De Transfer Pro is een transferplatform voor zittende transfers tussen bijvoorbeeld bed, (rol)stoel en toilet. De Transfer Pro heeft stevige zitkussens, ergonomische handvatten en een zachte beensteun voor een comfortabele transfer. Voor extra hulp en veiligheid voor de cliënt kan een Molift sling of belt worden gebruikt.

Voor het gebruik van de Transfer Pro is het belangrijk dat de cliënt instructies kan opvolgen, zich kan optrekken en stabiel is. De Transfer Pro ondersteunt een persoonlijke benadering, wat de waardigheid verbetert en de cliënt het gevoel geeft dat hij of zij deel uitmaakt van zijn of haar zorg. Bovendien wordt de zorgverlener tijdens de zit-naar-stand-transfer minder belast, omdat de cliënt zelf uit de stoel opstaat.



Kenmerken



Ergonomische grip

De diverse ergonomische gripopties voor de cliënt en zorgverlener, zorgen voor zowel comfort als ergonomische positionering van de handen.



Centrale rem

Druk met één voet op de centrale rem en beide wielen blokkeren, ongeacht de stand van de wielen.



Stabiele zitkussens

De zitkussens bieden een comfortabele transfer voor de cliënt. Het maximaal gebruikersgewicht van de Transfer Pro is 200 kg.



Kleine draaicirkel

Dankzij de hoogwaardige wielen kan eenvoudig gemanoeuvreerd worden, waardoor er minimale kracht nodig is bij het duwen/trekken van de Transfer Pro.

Accessoires



Molift Soft handgreep/lussen (2 stk)

Helpt de cliënt naar het handvat te reiken.

Molift Soft handgreep/lussen82511



Molift Assist Sling

Voor extra ondersteuning en veiligheid.

Molift Assist Sling S/M 82508

Molift Assist Sling L/XL 82509



Molift Assist Sling met glijstuk

Helpt bij het opstaan/gaan zitten en biedt ondersteuning tijdens de transfer.

Molift Assist Sling met glijstuk S/M..... 82528

Molift Assist Sling met glijstuk L/XL 82529



Molift Assist Belt

Helpt bij het opstaan/gaan zitten en biedt ondersteuning tijdens de transfer.

Molift Assist Belt S/M..... 82964

Molift Assist Belt L/XL..... 82965



Molift Assist Sling met glijstuk - breed

Helpt bij het opstaan/gaan zitten en biedt ondersteuning tijdens de transfer.

Molift Assist Sling met glijstuk - breed.... 90301



Molift Transfer Pro Infuuspaal

In hoogte verstelbare infuuspaal.

Molift Transfer Pro Infuuspaal.....1630030



Molift Transfer Pro zuurstoffles houder

Voor veilige opslag en transport van een zuurstoffles.

Molift Transfer Pro zuurstoffles houder.....1630040

Product	Artikel nr.	Specificaties										
Molift Transfer Pro	16090300	<table border="0"> <tr> <td>Hoogte</td> <td>1179 mm</td> </tr> <tr> <td>Lengte</td> <td>920 mm</td> </tr> <tr> <td>Breedte</td> <td>669 mm</td> </tr> <tr> <td>Voetenplaat hoogte</td> <td>56 mm</td> </tr> <tr> <td>Draaicirkel met open/gesloten poten</td> <td>1030/1146 mm</td> </tr> </table>	Hoogte	1179 mm	Lengte	920 mm	Breedte	669 mm	Voetenplaat hoogte	56 mm	Draaicirkel met open/gesloten poten	1030/1146 mm
Hoogte	1179 mm											
Lengte	920 mm											
Breedte	669 mm											
Voetenplaat hoogte	56 mm											
Draaicirkel met open/gesloten poten	1030/1146 mm											
Lengte gebruiker Minimum - Maximum	1490-2000 mm											
Gewicht Totaal gewicht Maximum gebruikersgewicht	28.2 kg 200 kg											
Materiaal Gepoedercoat aluminium, kunststof, staal, polyurethaanschuim		Reinig/desinfecteer het product met een standaard niet-schurend reinigingsmiddel met een pH-waarde tussen 5 en 9, of met een 70% desinfecterende oplossing.										

Molift sta-op-hulpen

Etac biedt diverse sta-op-hulpen voor verschillende behoeften en zorgomgevingen die veilige, comfortabele en waardige transfers bieden voor zowel de cliënt als de verzorger.



Etac Turner Pro is een sta- en draaiplatform waarmee je een cliënt van de ene zitpositie naar de andere kunt draaien. Uitstekend geschikt voor beperkte ruimtes.



Molift Raiser Pro is een transferplatform voor staande transfers over korte afstanden. Als de cliënt extra hulp nodig heeft bij het opstaan en gaan zitten, is er een Molift sling of belt beschikbaar.



Molift Transfer Pro is een transferplatform voor zittende transfers over langere afstanden. Voor extra hulp en veiligheid voor de cliënt kan een Molift belt of Sling worden gebruikt.



Molift Quick Raiser 1, 2 and 205 zijn elektrische zit-naar-sta-transferplatforms die worden gebruikt in combinatie met een comfortabele tilband.



Etac

0513 681 686
 contact.nl@etac.com
 www.etac.nl