



KLAXON

Klaxon Klick

Drivaggregat för ett aktivt liv i rörelse

Klick

Klaxon Klick är ett drivaggregat med styre som omvandlar en manuell rullstol till en eldriven rullstol. Med Klick kan användaren färdas längre sträckor och ta sig fram i olika typer av terräng med mindre ansträngning jämfört med manuell framdrivning. Klick-produkterna är designade för att ge ökad självständighet, frihet och körglädje.



Klick system för central infästning

Utformningen av Klaxon Klick bygger på enkelhet och användarvänlighet. Kärnan i designen är det patenterade Klaxon Central Linking System, som gör det möjligt att koppla på Klick-aggregatet på rullstolen med ett enda "klick". Den tetra-anpassade infästningen är utformad så att även personer med begränsad funktion i överkroppen kan använda systemet. Klick-aggregatet kan enkelt monteras av i tre delar för smidig förvaring och transport.

Ingen permanent anpassning av rullstolen krävs vid installation, och Klick kan enkelt tas bort när det inte används.

System för lateral infästning

För användare med en rullstol som inte har utrymme för ett centralt infästningssystem finns även ett lateralt infästningssystem. Detta system är särskilt anpassat för rullstolar med exempelvis insvängd front och möjliggör enkel montering.



Elektroniska funktioner

Klick-produkternas köregenskaper kan anpassas för att möta individuella behov och är utrustade med följande elektroniska funktioner.



Motor direct control (MDC)

Elektronisk gas och broms styrs via gasreglaget, vilket ger användaren full kontroll över enheten. Intensiteten kan ställas in i tio olika nivåer



Electronic braking system (EBS)

Den elektroniska bromsen aktiveras med ett lätt tryck på bromshandtaget. Vid ett ytterligare tryck aktiveras den mekaniska bromsen. Detta system ger ökad kontroll och säkerhet för användaren. Bromsintensiteten kan justeras i tio olika nivåer



Intelligent speed control (ISC)

Gör det möjligt för användaren att ställa in önskad hastighet, vilket hjälper till att hålla en jämn hastighet i både uppförs- och nedförsbackar.



Hill hold control (HHC)

Detta system ger tillfällig bromshjälp och förhindrar att drivaggregatet rullar bakåt när hastigheten understiger 1 km/h. Funktionen eliminerar behovet av att använda både gas- och bromsreglage vid omstart i uppförsbackar. (Tillval)


Certifieringar

Klicks elektronik är utvecklad med certifierad programvara enligt IEC62304-standarden för medicintekniska produkter, och har genomgått omfattande livslängdstester. Samtliga Klick-produkter är även certifierade enligt TUV EN12184.



Standardstyre

Standardstyrets ergonomi är optimerad för att underlätta användarens framdrivning samt när man kopplar på och av drivaggregatet från rullstolen. De specialdesignade reglagen är lättåtkomliga och enkla att använda. Användaren har full kontroll över funktionerna tack vare de multi-digitala knapparna, som ger direkt åtkomst till alla funktioner i displaymenyn.

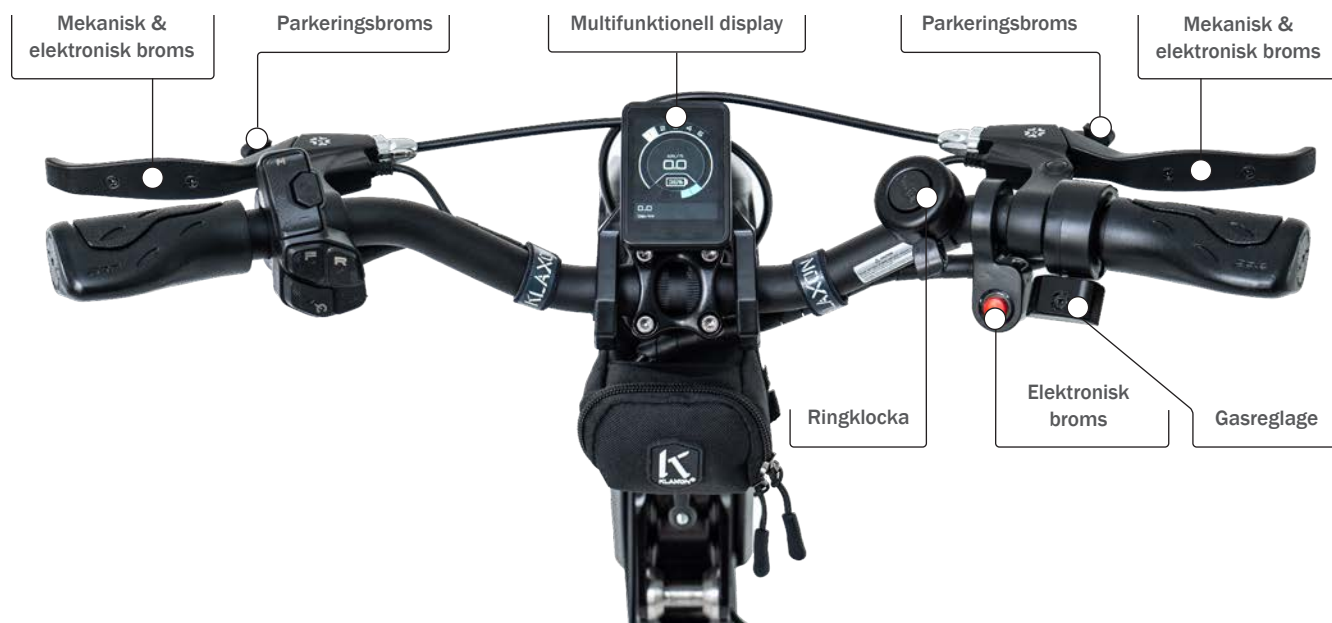

Tetrastyre

Med tetra-styret kan användaren enkelt öka och sänka hastigheten genom att trycka styret framåt eller dra det bakåt. Det är enkelt och går snabbt att lära sig köra, även för personer med nedsatt rörelseförmåga. Genom att släppa styret aktiveras den elektroniska bromsen. Ett komplett sortiment av Tetra-tillbehör gör det möjligt att maximera anpassningen av handgreppet.



Individanpassad körupplevelse

Det är enkelt och smidigt att anpassa Klicks körupplevelse och prestanda. Användaren kan justera drivaggregatets inställningar och välja vilka funktioner som ska aktiveras eller avaktiveras, utan att behöva hjälp av en kvalificerad tekniker. Allt som krävs är att gå in i displaymenyn via knappsetsen och ändra de olika inställningarna.

Den väl synliga LCD-displayen i färg är systemets kärna och visar all färdinformation, inklusive återstående batteritid och räckvidd. Menyn ger användaren möjlighet att när som helst anpassa inställningarna.



E-Braking level	Justera intensiteten för den elektroniska bromsen med återladdning i 10 nivåer eller avaktivera den.
Acceleration level	Justera accelerationsintensiteten i 10 olika nivåer.
Motor brake level	Justera bromsintensiteten upp till 10 nivåer.
Reverse gear speed	Justera max hastighet bakåt.
Battery size	Välj den batterityp som används för att få korrekt information om laddningsstatus och räckvidd.
Auto light	Hantera manuell eller automatisk aktivering av belysning.
Speed limit	Justera max hastighet efter hastighetsgräns.
Trip reset	Återställ km-angivelsen.
Select km/h or mph	Visa data i önskad enhet.
Password on or off	Stöldsdydd.
Reverse sound alarm	Aktivera eller avaktivera varningsljud vid backning.
Serial number	Visa produktens serienummer.
Software release	Visa installerad programversion.
Error history	Visa eventuella driftfel.



Klick Light


Ett drivaggregat i lättvikt för ett aktivt liv i rörelse.

Tack vare den kraftfulla 750 W-motorn är Klick Light alltid redo att ge dig all den kraft du behöver när det verkligen gäller. Med en vikt på endast 8,8 kg är Klick Light perfekt för tonåringar, vuxna med begränsad styrka i överkroppen och personer som behöver en kompakt och lätt modell, exempelvis för transport i fordon. Den är även idealisk för miljöer med begränsat utrymme.

Elektroniska funktioner som Motion Direct Control (MDC), Electronic braking system (EBS), och Intelligent Speed Control (ISC), ingår som standard.



Teknisk data

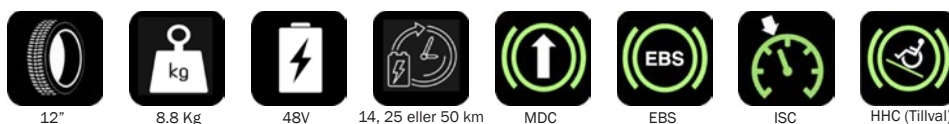

12" hjul Allroad	Standard
Motor	Borstlös 750W
Vridmoment	45Nm
Max hastighet	20 km/h (där det är tillåtet enligt lag)
Val av 48 V batteri	Räckvidd 14 km, 25 km eller 50 km (*)
Mekaniska skivbromsar	Enkelt bromsok
Självjusterande stödben	Standard
Val av styre	Standard eller tetra
Val av infästningssystem	Centralt eller lateralt
Standarddäck	12"/ 2.125
Vikt	8.8 kg
Hill hold control (HHC)	Tillval
Belysning LED light	Tillval
Dekal batteri, reflekterande, olika färgval	Tillval
Hydraulisk bromssats med dubbla kolvar	Tillval

*Räckvidden beror på vilken typ av batteri som är installerat. De angivna värdena avser tester som utförts på plan mark med en hastighet på 10 km/h och en användarvikt på 75 kg.

Klick Power


Ett kraftfullt drivaggregat med energi för äventyr.

Med en 750 W-motor och ett urval av däck kan Klick Power anpassas för att möta användarens specifika behov. Den perfekta balansen mellan vikt och drivkraft gör den till en idealisk lösning för mobilitet i stadsmiljö. Anpassningen av däcktyper gör det möjligt för användaren att skräddarsy sin upplevelse och hitta den bästa kombinationen av funktionalitet och användarvänlighet.

Elektroniska funktioner som Motion Direct Control (MDC), Electronic braking system (EBS), och Intelligent Speed Control (ISC), ingår som standard.



Teknisk data

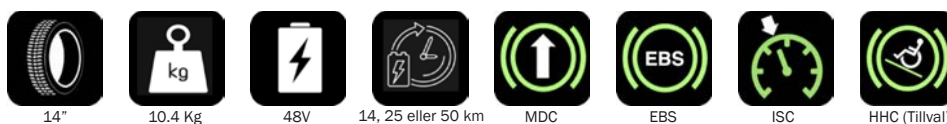

14" hjul Allroad	Standard
Motor	Borstlös 750W
Vridmoment	50Nm
Max hastighet	20 km/h (där det är tillåtet enligt lag)
Val av 48 V batteri	Räckvidd 14 km, 25 km eller 50 km (*)
Mekaniska skivbromsar	Dubbelt bromsok
Självjusterande stödben	Standard
Val av styre	Standard eller tetra
Val av infästningssystem	Centralt eller lateralt
Standarddäck	14"/ 2.50
Vikt	10.4 kg
Hill hold control (HHC)	Tillval
Belysning LED light	Tillval
Dekal batteri, reflekterande, olika färgval	Tillval
Hydraulisk bromssats med dubbla kolvar	Tillval

*Räckvidden beror på vilken typ av batteri som är installerat. De angivna värdena avser tester som utförts på plan mark med en hastighet på 10 km/h och en användarvikt på 75 kg.

Tillbehör – Väskor och korgar



Frontväska

Klaxon-väskan är inspirerad av mc-världen och passar perfekt för både shopping och äventyr.




Transportväska

En transportväska med hjul, specialdesignad för att enkelt rymma och transportera din Klick på ett bekvämt sätt.



Sidoväska

Klaxon-väskan är inspirerad av mc-världen och utgör det perfekta komplementet till frontväskan för en komplett biker-look! Väskan finns i modeller för både vänster och höger sida.

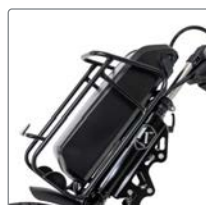


Ram för väska

Gör det möjligt att hänga väskor på Klick.



Fäste korg

Fästet gör det möjligt att enkelt fästa korgen på Klick.

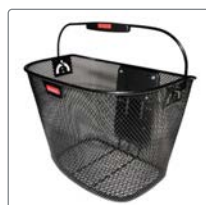

Korg

Perfekt för daglig shopping eller för att bekvämt bära med dig det du behöver. Finns i storlekarna 10 eller 16 liter.

Tillbehör – Generella




Förlängning styre

En universell förlängning i aluminium, perfekt för användare som vill ha styret närmare kroppen.



Baklampa, röd

Den röda baklampan är en del av den säkerhetsutrustning som ska monteras på Klick.

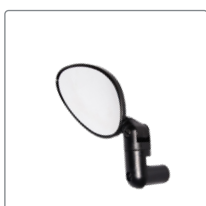

Bakspiegel

Passar alla styren.




Hydrauliskt bromsok kit

Det hydrauliska bromsoket med dubbla kolvar ger ökad bromsprogression och bromskontroll.



Vikter

(2 + 2 kg) Ökar greppet mot underlaget.

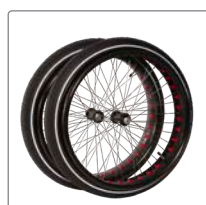

Drivhjul Fat wheel kit

Fat wheel för rullstolar för bästa möjliga körupplevelse.



LED-belysning


Den främre LED-belysningen levereras med ett monteringsfäste.



Fäste för tetrastyre

Universalfäste med klämring för tetrastyre.

Tillbehör – Generella forts.

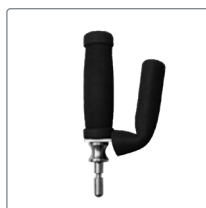


Tetrahandtag, vertikalt

Ett vertikalt tetrahandtag som underlättar hanteringen av styret och manövreringen för användare med nedsatt handfunktion.



Central infästning Tetra

Komplett tetra infästning med ergonomiskt neoprenhandtag och utlösningsspak för enklare grepp.

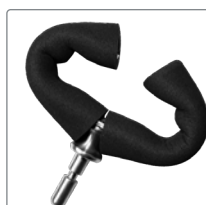

Tetrahandtag, horisontalt

Ett horisontellt tetrahandtag som underlättar hanteringen av styret och manövreringen för användare med nedsatt handfunktion.



Tetrahandtag, tripod

Ett tripod tetrahandtag som underlättar hanteringen av styret och manövreringen för användare med nedsatt handfunktion.



Central infästning standard

Komplett tvärgående infästning, tillgänglig i tre olika längder.



Dekal batteri


Reflekerande dekal för batteri i olika färgval – Reflex, Ljusblå, Blå, Lila och Röd

Tillbehör – Däck




Allroad 14/2.125 (L55 mm)

14" däck. Passar till Klick Power.

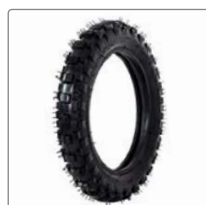

Cross 2.5 x 10*(2) (L.63 mm)

14" däck. Passar till Klick Power.

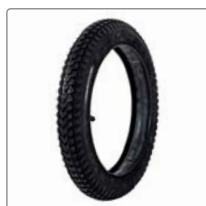

Enduro 14/2.125 (L55 mm)

14" däck. Passar till Klick Power.

Översiktstabell

	Klick Light	Klick Power	
Generell	Borstlös motor	750W med epicyklisk reducering	750W med epicyklisk reducering
	Vridmoment	45Nm	50Nm
	Vikt (3)*	8.8 kg	10.4 kg
	Material (Ram/Gaffel/Hjulfälg)	Aluminium	Aluminium
	Hjuldiameter	12" / 312 mm	14" / 363 mm
Batteri	Litiumjonbatteri med automatiskt överspänningsskydd		48V x 2.9 Ah (140 Wh) Vikt: 1.4 kg Räckvidd: 12-14 km (5)* 48V x 5.8 Ah (280 Wh) Vikt: 2.0 kg Räckvidd: 20-25 km (5)* 48V x 11.6 Ah (528 Wh) Vikt: 3.1 kg Räckvidd: 45-50 km (5)*
	Däck standard	Allroad 12"	Allroad 14"/2.50
Däck	Däck tillval		Enduro 14"/2.125
	Däck tillval		Cross 2.5x10*(2)
	Däck tillval		Allroad 14"/2.125
	Däck tillval		Allroad 14"/2.125
Broms	Skivbroms med mekaniskt bromsok	Enkelt bromsok	Dubbelt bromsok
	Skivbroms med hydrauliskt bromsok och dubbla kolvar	Tillval	Tillval
	Max hastighet (4)*	20Km/h	20Km/h
	5 hastighetsnivåer via knappsats	✓	✓
	Backväxel med anpassad hastighet	✓	✓
Köregenskaper	Ställbar acceleration	10 nivåer	10 nivåer
	Intelligent speed control (ISC)	✓	✓
	Electronic brake system (EBS)	✓	✓
	Motion direct control (MDC)	✓	✓
	Hill holder control (HHC)	Tillval	Tillval
	Elektronisk broms med återladdning	✓	✓
	Justering av bromsintensitet	9 nivåer	9 nivåer
	Automatisk elektronisk broms vid släpp av gasreglage	9 nivåer	9 nivåer
	Justering av maxhastighet	✓	✓
	LCD-display med hög synlighet i färg	✓	✓
	USB-uttag för smartphone	✓	✓
	Automatisk strömbrytare för belysning	✓	✓
	Varningsljud för aktivering vid backning	✓	✓
	Övrigt	Handtering av batteristorlek	✓
Självjusterande, avtagbart stödben	✓	✓	
Justering av styromotstånd för antirotation	✓	✓	

(1) Certifiering av elektronik och medicinsk mjukvara enligt IEC62304

(2) Certifiering godkänd av TÜV EN12184 - CE - FDA

(3) Den angivna vikten avser Klick utan batteri*

(4) Den angivna hastigheten är enhetens maxhastighet. Vänligen kontrollera laglig gräns*

(5) De angivna värdena avser tester som utförts på plan mark med en hastighet på 10 km/h och en användarvikt på 75 kg*



Klaxon_Klipk_Brochure_03_2501

Etac är en världsledande utvecklare av hjälpmedel för människor med funktionsvariationer och produkter för patientförflyttningar. Syftet med vår verksamhet är att erbjuda lösningar som förbättrar livskvaliteten för användare, deras familjer och vårdgivare.

För produktens avsedda ändamål, nyheter och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök www.etac.se

Etac Sverige AB

 0371-58 73 00

 info@etac.se

 www.etac.se

 **etac**[®]
Creating Possibilities