

etac[®]
Creating Possibilities



etac[®]

Etac Xact

Lichtgewicht vastframe rolstoel met wegzwenkbare beensteunen voor een actieve levensstijl

Xact wat je nodig hebt

Etac Xact rolstoel is er voor iedereen die het maximale uit het leven wil halen en volop wil genieten met een actieve, lichtgewicht en stevige rolstoel met wegzwenkbare beensteunen. Geschikt voor iedereen die bij een transfer de voeten op de grond zet. Xact is ontworpen voor een actieve levensstijl.



Unieke eigenschappen

Xact is de enige lichtgewicht vastframe rolstoel met het 3A rugsysteem. Met het Etac 3A rugsysteem kun je de rolstoel aanpassen aan individuele capaciteiten en lichaamsvorm, waardoor je de gewenste positioneringsdoelen bereikt.

Xact heeft een vastframe met wegzwenkbare beensteunen waarin zitaanpassingen, lichtheid en makkelijk voortbewegen samenkomen.

Ability Based Seating™

Iedereen heeft een unieke lichaamsvorm en ieders vaardigheidsniveau is anders. Het afstemmen van de rolstoel op de individuele behoeften door middel van verfijningen en aanpassingen om aan ieders mogelijkheden te voldoen, is onze filosofie. Wij noemen dit Ability Based Seating™.

Met de juiste aanpassingen kan iedereen beter zitten, vermoeidheid verminderen, de zitduur gedurende de dag verbeteren en het manoeuvreren en voortbewegen efficiënter maken.



3A-rugstelsysteem voor optimale ondersteuning

Het 3A-rugstelsysteem biedt ondersteuning voor het bekken, wat essentieel is voor een stabiele rompbalans, doordat dit de contouren van de wervelkolom kan volgen en/of ondersteunen. Ondersteunend zitten heeft een positieve invloed op het voortbewegen van de rolstoel. Ontdek de voordelen van het 3A-systeem.

Het 3A-rugstelsysteem is vernoemd naar Altus, Altitudo en Angulus, die de unieke ingebouwde aanpassingen beschrijven.



Rugzit hoek - Altus

De rug-zithoek kan worden aangepast aan de meest gecorrigeerde houding van het bekken of voor lange benen, waardoor er rekening wordt gehouden met een korte of lange zitdiepte (verstelbaar tot 8 cm).



Rughoogte - Altitudo

Traploze verstelling van de rugleuninghoogte voor ieder lichaam.

*Met rugverlenging



Lumbaal hoek - Angulus

De unieke lumbaal hoek biedt een contour die de wervelkolom volgt, om het bekken en thoracaal te ondersteunen.



Altijd passende oplossingen

De gebogen vorm van het 3A-rugprofiel in combinatie met de verstelbare spanbanden en optionele accessoires, zoals zijsteunen, wiggen en rugverbreiding, stelt je in staat om de houding en ondersteuning te creëren die nodig is.

Kenmerken



Zithoogte

Eenvoudig aan te passen en de zithoogte te veranderen wanneer de behoeften veranderen, voor dezelfde of een nieuwe gebruiker (zie gebruikershandleiding). Verstelbaar tot 10 cm in hoogte.



Compact en lichtgewicht

Compact opvouwbaar en met een transportgewicht vanaf slechts 5,4 kg is de Xact licht en gemakkelijk mee te nemen, waar je ook naar toe gaat.



Voortbeweging

Door een goede pasvorm en een laag rolstoelgewicht minimaliseert de Xact het energieverbruik bij voortbeweging. De gewichtsverdeling via de 3A-rugleuning en de achterwielas weerspiegelt zowel biomechanica als mechanica, wat de voortbeweging aanzienlijk beïnvloedt.



Lichtgewicht beensteunen

Actieve wegzwenkbare beensteunen hebben een verlaagd gewicht van 200 gram. Zwenk ze opzij of verwijder ze om op te staan en transfers te vergemakkelijken, evenals te trippelen. Zet ze rechtop op een vlakke ondergrond voor eenvoudig bereik wanneer nodig.

Accessoires



Armsteunen lang of kort

Lichtgewicht armsteun met armlegger van 25 cm (kort) of 38 cm (lang). Afneembaar en in hoogte verstelbaar van 23-29 cm vanaf het zitframe.




Spatbord

Verstelbaar in hoek, hoogte, diepte. Carbon fiber.



Duwhandvatten

In hoogte verstelbaar 15 cm en een kort handvat van 7,5 cm.

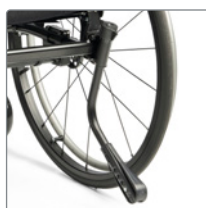

Anti-kiep

Wegzwenkbaar. Kan door de gebruiker, vanuit de rolstoel worden bediend.

Maatvoering

Xact model	Arikelnr.	Max. gebr. gewicht	Breedte	Zitdiepte	Gewicht
Standaard 35 cm	13250101	100 kg	55 cm	38 - 46 cm	9.8 kg
Kort 35 cm	13250102	100 kg	55 cm	35 - 43 cm	9.8 kg
Standaard 37.5 cm	13250103	100 kg	57.5 cm	38 - 46 cm	9.9 kg
Kort 37.5 cm	13250104	100 kg	57.5 cm	35 - 43 cm	9.9 kg
Standaard 40 cm	13250105	100 kg	60 cm	38 - 46 cm	10 kg
Kort 40 cm	13250106	100 kg	60 cm	35 - 43 cm	10 kg
Standaard 42.5 cm	13250107	100 kg	62.5 cm	38 - 46 cm	10.1 kg
Kort 42.5 cm	13250108	100 kg	62.5 cm	35 - 43 cm	10.1 kg
Standaard 45 cm	13250109	135 kg	65 cm	38 - 46 cm	10.3 kg
Kort 45 cm	13250110	135 kg	65 cm	35 - 43 cm	10.3 kg
Standaard 47.5 cm	13250111	135 kg	67.5 cm	38 - 46 cm	10.4 kg
Kort 47.5 cm	13250112	135 kg	67.5 cm	35 - 43 cm	10.4 kg
Standaard 50 cm	13250113	135 kg	70 cm	38 - 46 cm	10.4 kg
Kort 50 cm	13250114	135 kg	70 cm	35 - 43 cm	10.4 kg

Gewichten en afmetingen zijn opgegeven voor een rolstoel met een 3A-rug systeem, 24" Maxx-wielen met hoge drukbanden en harde aluminium hoepels, schaarremmen, aluminium voorvorken met 5" 125x28 voorwielen, actieve beensteunen en voetsteunen met een korte bevestigingsbuis. Het transportgewicht zoals hierboven vermeld is exclusief de achterwielen en been-/voetsteunen. De opgegeven afmetingen en gewichten kunnen variëren met ± 2%.

Frame hoogte voorzijde 40,5 - 50,5 cm (15¾-19,9")	Frame hoogte achterzijde 37,5 - 47,5 cm (14¾-18¾")	Frame hoek 4°
---	--	-------------------------

Etac

0513 681 686
contact.nl@etac.com
www.etac.nl

etac[®]
Creating Possibilities