



# Molift Mover 180


**molift**<sup>®</sup>  
by Etac

## Snabbguide (SV)

QG08104 Rev B 2022.10.17

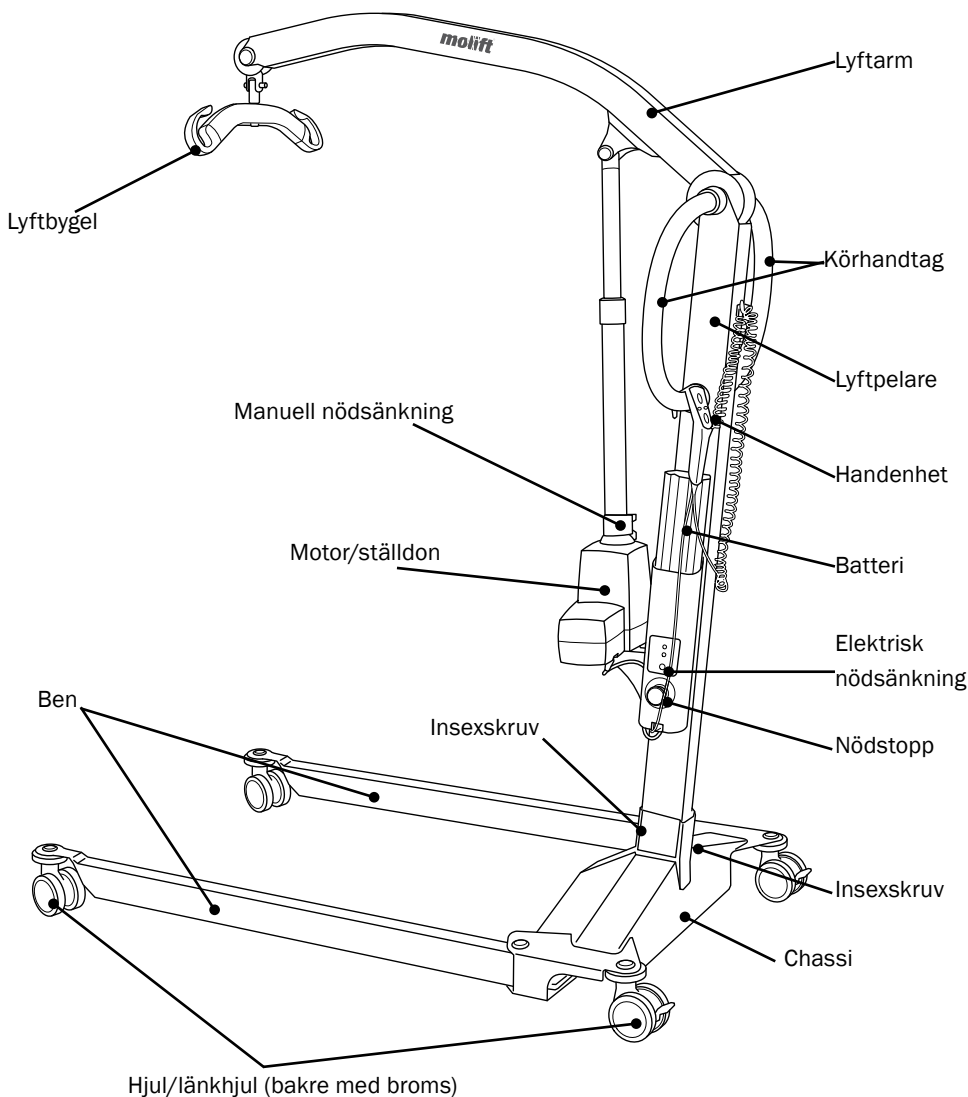

Serviceindikator 	Läge
Inget ljus	Energibesparing (standby)
Grönt	Klar för användning
Gult	Beställ service
Rött	Utför service
Röd + ljud	Utför service omedelbart

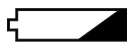Batteriindikator 	Läge
Ljus	Låg batterinivå
Inget ljus	Batteri laddat

### Viktigt



**Läs igenom manualen före användning! Denna snabbguide ersätter inte manualen. Det är viktigt att du förstår innehållet i manualen fullt ut innan du försöker använda utrustningen. Gå till [www.etac.com](http://www.etac.com) för den senaste versionen av manualen.**




**Överskrid aldrig säker arbetsbelastning (SWL) på 180 kg (397 lbs). Om den högsta arbetslasten (SWL) skiljer sig mellan lyften och enheten för kroppsstöd ska alltid den lägsta maximala arbetsbelastningen användas.**







**Molift-lyftar får endast användas för att lyfta personer. Använd aldrig lyften för att förflytta någon typ av föremål.**


## Handenhet och manövrering

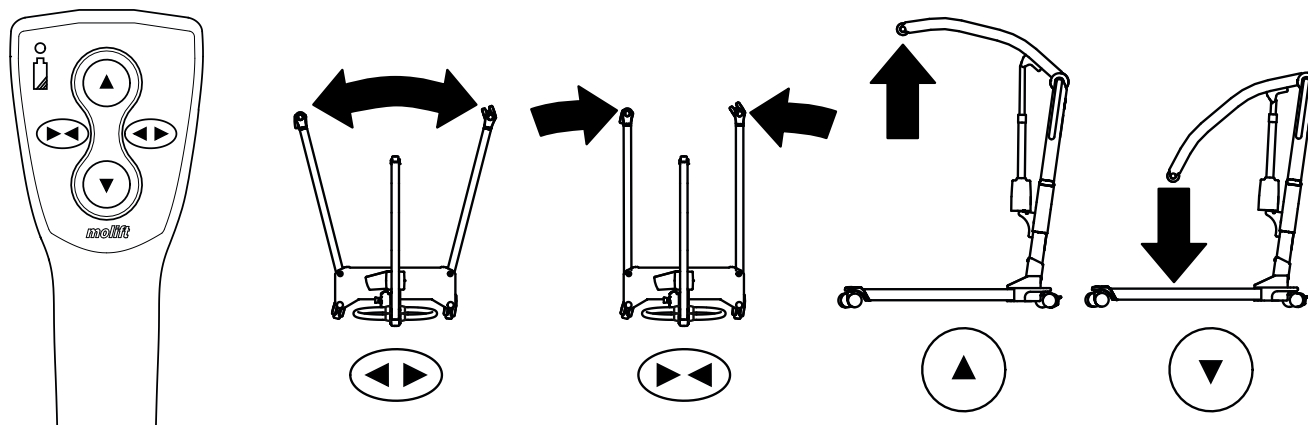



## Placering av lyftbygel och fastsättning av sele

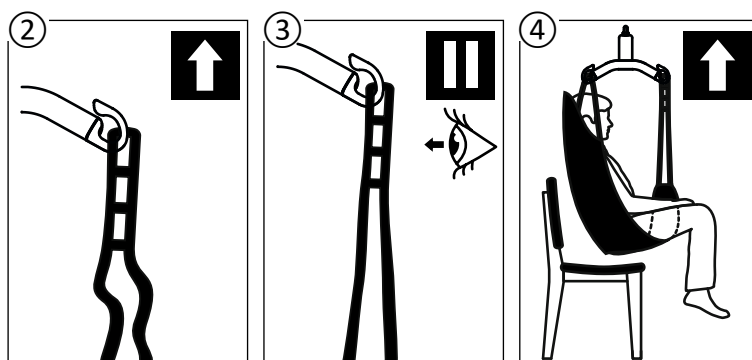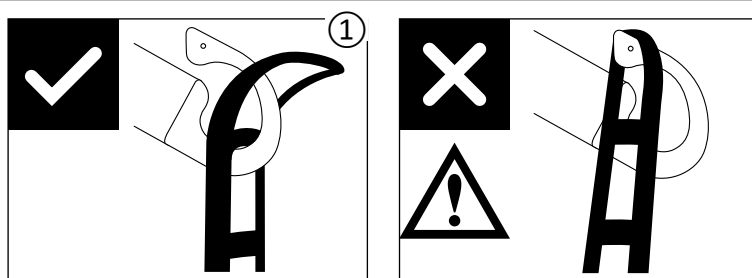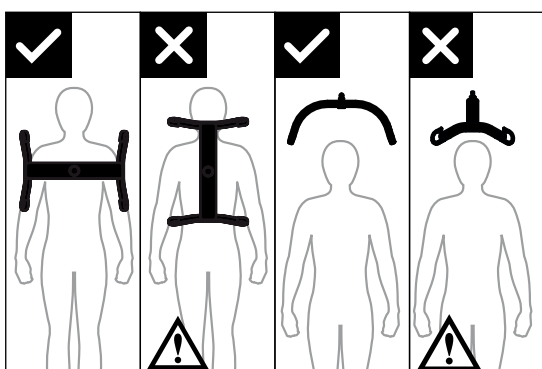


 **Lyft aldrig brukaren högre än nödvändigt för att utföra ett lyft. Tänk på att hjulen på en mobil lyft INTE får vara låsta.**

 **Lyften får inte användas för att lyfta eller flytta brukare på lutande ytor.**

## Brukarpositioner för förflyttning och sänkning

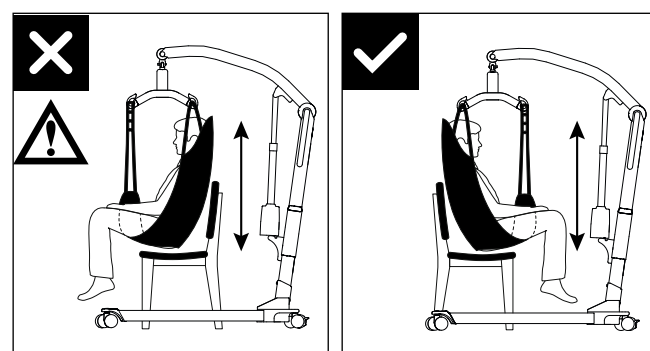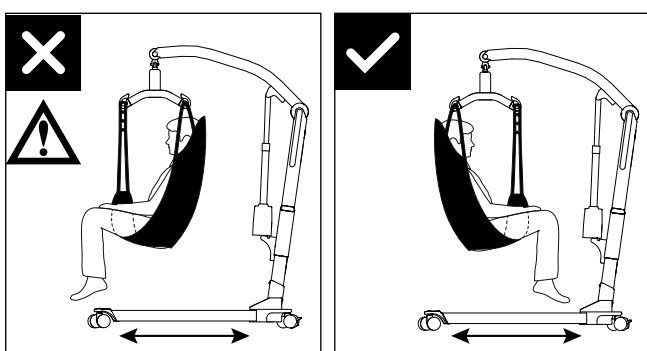

 **Tryck inte på eller dra i brukaren, lyftarmen eller ställdonet. Detta kan orsaka problem med stabiliteten och lyften kan välta.**

 **Lämna aldrig en brukare utan tillsyn vid lyft.**