

2024-02-05

Detalj	Kontroll	Åtgärd
Rörliga delar	Kontrollera att rörliga delar kan dras åt och är åtdragna ordentligt enligt anvisning.	Rengör rörliga delar, byt ev. ut defekta skruvar eller andra defekta delar.
Klädsel	Inspektion av tyg och kontroll av sömmar.	Klädseln är avtagbar och överdraget kan tvättas i max. 60°C med ett mildt tvättmedel i tvättmaskin. Separera skumdelen från överdraget före tvätt. Skumdelarna bör inte tvättas.
Rengöring		<p>Produkten kan tvättas i maskin avsedd för tvätt av medicintekniska produkter, 10 min i 60°. Använd ett mildt rengöringsmedel eller desinfektionsmedel utan klor. Demontera produkten innan tvätt så att alla delar blir helt rena. De olika komponenterna i chassit måste torkas av noggrant för att avlägsna lösa partiklar innan tvätt. VIKTIGT! Låt produkten torka ordentligt innan du använder den. Ta bort tillbehör och dynor före tvätt och rengör dem separat.</p> <p>Tyg och överdrag: Överdragen kan tvättas i 60°C med ett mildt tvättmedel i tvättmaskin. Separera skumdelen från överdraget före tvätt. Skumdelarna bör inte tvättas.</p> <p>Obs! Etiketter behöver täckas innan användning av rengöringsmedel eller rengöringssprit.</p>
Desinfektion		<p>Desinficera produkten, utan tillbehör och dynor, med en 70% isopropanollösning. Vi rekommenderar att man använder en trasa som doppats i varmt vatten med mildt rengöringsmedel/tvål utan blekmedel för att torka bort skräp och smuts. Låt torka före desinficering.</p>
Plastdetaljer	Kontrollera att plastdetaljer inte har sprickor.	Byt vid behov ut defekta delar.

Detta är en allmän beskrivning av de punkter som bör gås igenom när ett hjälpmedel rekonditioneras. Därutöver förväntar sig R82 att den personal som arbetar med rekonditionering självständigt bedömer varje objekts tillstånd, så att eventuella skador eller funktionsstörningar som inte upptas i schemat åtgärdas innan objektet lämnas ut till ny användning.

R82 kan inte ställas till ansvar för felaktiga underhålls- eller reparationsåtgärder från rekonditioneringspersonalens sida.

Originalreservdelar från R82 skall alltid användas.