

## STAR puder

StarLock, Stabil Air, Standard Air og Star Galaxy

### Vaskeråd pude

#### Vask i hånden eller Maskinvask

Før rengøring/desinfektion skal betrækket fjernes og vaskes separat (se vaskeråd betræk).

Luk oppumpningsventilen. Rengør puden manuelt med sæbe, bikarbonat eller eddike.

Eller maskinvask ved 40° (eller 60° i 10 min.).

Skyl og aftør. OBS! Puden skal være fyldt med en vis mængde luft ved maskinvask og må ikke centrifugeres eller tørretumbles.

#### Desinficering

Til desinfektion af puden må der kun anvendes en 70 % alkoholbaseret desinfektionsopløsning.

Et defekt produkt må ikke anvendes.

### Vaskeråd betræk

#### Maskinvask

Fjern betrækket og luk lynlåsen. Maskinvask i varmt vand (maks. 60°C standardbetræk, maks. 80°C inkontinensbetræk). Må ikke bleges. Skyl i koldt vand, og tør i tørretumbler ved lav temperatur eller på snor. Må ikke renses.

#### Desinficering

Betrækket kan maskinvaskes i varmt vand (80 °C) for at desinficere det. Tørretumbles ved lav temperatur.



Star Lock pude med pumpe



Star Stabil Air

