

## Rengjøring pute

### Håndvask

1. Steng luftventilen før vask.
2. Skyll i kaldt vann.
3. Vask med oppvaskmiddel og lunkent vann.  
(Om du ikke kommer til ordentlig mellom cellene, slipp luften ut av puten og steng luftventilen.)

### Alternativt

### Maskinvask

1. Slipp luften ut og steng samtlige luftventiler før vask.
2. Legg puten/madrassen i ett putevar/vaskepose. Bruk flytende vaskemiddel uten blekemiddel.
3. Vaskes på maks 60°C i 10 min

OBS! Må ikke sentrifugeres eller tørketromles. Kan tørkes i tørkeskap på lav varme.

Star Lock - Om det er vann i ballpumpen etter vask, ta av ballpumpen og tøm vannet ut. Sett så ballpumpen tilbake på plass igjen.

### Desinfeksjon

#### Punktdesinfeksjon:

1. Bearbeid utsiden godt med et godkjent desinfeksjonsmiddel.

#### Hele produktet:

2. Vask godt med desinfeksjonsmiddel (f.eks. Virkon, Perasafe)
3. Skyll nøye



Star Lock pute med ballpumpe

## Rengjøring trekk

### Maskinvask

Vaskes på 60°C med vaskemiddel for farget vask. Tørketromles på lav varme eller drypptørkes. Må ikke renses.

### Desinfeksjon

Bløtlegg i desinfeksjonsløsning, skyll nøye.



Star Standard Air