

Generelt for puder inden reparation. Følg nedenstående vaskeråd for pude

Vask i hånden

1. Luk luftventilen inden vask i hånden.
2. Brus med koldt vand.
3. Vask med opvaskemiddel og lunkent vand.

(Hvis du ikke kan komme ordentligt til mellem cellerne, luk mere luft ud af puden og luk herefter ventilen).

Alternativt

Maskinvask

1. Luk luften ud og luk samtlige ventiler inden vask.
2. Læg puden i et hovedpudebetræk/vaskepose. Anvend flydende vaskemiddel uden blegemiddel.
3. Max 60°C i 10 min.

OBS! Må ikke centrifugeres eller tørretumbles.

Star Lock: Er der vand i pumpen efter maskinvask skal den fjernes og tømmes for vand. Sæt derefter pumpen tilbage hvor den var påmonteret.

Generelt se Vaskeanvisning/Desinficering:

https://www.etac.com/c4documents/genbrugsanvisning-star_591636.pdf

Skift af ventil

1. Rengør pude
2. Tag fat i ventilen med en tang. Hold imod med den anden hånd på neoprenen der hvor ventilen stopper.
3. Træk ventil ud.



Star Lock pude med pumpe

OBS! Der er risiko for at, puden ødelægges, hvis der ikke holdes korrekt på denne og ventilen.

4. Opvarm ventilhullet med en varmeblæser/hårtørrer, så det bliver flexibelt.
5. Tag en ny ventil og varm ligeledes denne, på den del som skal i ventilhullet.
6. Spray den del af ventilen som skal i ventilhullet med hårspray. (Hårspray har glideeffekt indtil det er fordampet).
7. Skub ventilen i ventilhullet.
8. Vent ca. 15 minutter og puden kan pumpes igen.
9. Det anbefales at lade puden ligge i op til 72 timer for at sikre at den ikke taber luft.

Lapning

1. Rengør pude.
 2. Pump puden moderat.
 3. Kontrollér, om der er synlige huller i puden. Hvis der ikke er synlige huller, kan du holde puden under vand i en vask eller en balje (med ventilen/ventilerne lukket tæt i) og se efter luftbobler.
 4. Finder du knappenålsstore huller, kan du bruge det medfølgende reparationssæt til at lappe dem. (Hvis du finder store huller eller andre lækager, skal puden til vurdering/reparation på vores værksted.)
 5. Placer en tandstikker i hullet for at identificere stedet.
 6. Lad området tørre.
 7. Slib området ru med det medfølgende sandpapir.
 8. Tør området af.
- VIGTIGT: sørg for at området er rent og tørt før du fortsætter.
9. Fjern bagbeklædning fra den medfølgende lap fra reparationssættet.
 10. Påsæt lappen, tryk den fast, specielt ved kanterne.
 11. Det anbefales at lade puden ligge i op til 72 timer for at sikre at puden ikke taber luft.