

Brukermanual

Overmadrass skummadrasser Lück

Gratulerer med din nye overmadrass.
Følg instruksjonene som står på madrassen og i denne manualen.

Denne overmadrassen er spesielt utviklet for å møte kravene til hygiene i helsesektoren. Kravene oppfylles ved at trekket er bakterie- og virusbestandig. Trekket kan også tørkes av med vanlige desinfeksjonsmidler som brukes i helsesektoren.



NB! Utpakking av madrassen

Vakuumpakkingen av overmadrassen bør åpnes umiddelbart når du tar madrassen ut av esken.

Kutt teipen langs stripen på esken for å ta ut overmadrassen. Vær forsiktig så du ikke kutter i overmadrassen ved åpning av esken. Overmadrassen er vakuumpakket i plast og rullet sammen. Åpne plasten i hjørnene og ta ut madrassen slik at den får luft og kan komme tilbake til normal størrelse. Etter 24 timer er overmadrassen tilbake til sin riktige størrelse, og overmadrassen er klar til bruk.

*Plasten er kun til bruk for pakking og transport av overmadrassen.
Hold den borte fra barn. Putt aldri plast over hodet.*

Bruksområder: Sykehus, sykehjem/institusjoner og i hjemmet.




Produsent



Tiltenkt bruk: Brukes av hygieniske grunner i helseinstitusjonene. Ingen kontraindikasjoner og / eller applikasjonsrisiko.

Bruksanvisning: Ingen montering nødvendig. Legg overmadrassen oppå en ren helmadrass, bruk strikkene i hver hjørne slik av overmadrassen holder seg i riktig plasser i forhold til madrassen under.

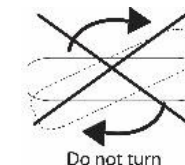

Overmadrassen er merket med «denne side opp»: top side.

Det er anbefalt å alltid bruke laken på overmadrassen. Vær forsiktig ved bruk av sidegrind på sengen. Størrelsen på overmadrassen må passe størrelsen til madrassen under.

Anbefalt brukervekt Rhombo-Care Sky: fra 40-150 kg.



Vedlikehold og stell

Madrasskjernen: Materialene krever ikke vedlikehold. Anbefalt autoklaving 75° (potensiell endring i størrelsen på madrasskjernen), mulighet for spraydesinfeksjon. Etter gjennomgått prosedyre er overmadrassen klar for bruk igjen.

Trekk: Følg instruksjonene på etiketten. Trekket kan desinfiseres med vask eller avtørking. Våre PU-belagte produkter tåler alkoholbaserte desinfeksjonsmidler meget godt. Fenol- eller fenolderivater kan også brukes i fortynnede konsentrasjoner (følg anbefalingene fra produsenten av desinfeksjonsmidlet). Ikke desto mindre anbefaler vi alltid å teste det aktuelle produktet før du bruker det.

Før du legger på trekket igjen må du kontrollere at trekket er intakt.

Anbefaling: Ikke røyk i sengen!

Ved behov for livreddende hjerte/lungeredning (CPR) legg et fast underlag/brett under personen.

Ved alvorlige hendelser i forbindelse med produktet, må både produsenten og de aktuelle myndighetene i brukerens hjemland informeres!

Overmadrassen kan kastes i henhold til lokale forskrifter. Produktet bør rengjøres før avhending for å forhindre risiko for forurensning.

Leverandør:

Etac AS, Vanemveien 1, 1599 Moss

www.etac.com