

Brukermanual

Aparto Server/Aparto Brevo Server



Funksjon:

Aparto Server heves enkelt ved å ta tak i topplaten og løfte den til ønsket høyde. For å senke topplaten tar man tak i utløsergrepet som er tilgjengelig fra begge sider med den ene hånden og trykker lett ned med den andre hånden til ønsket høyde. For å få enda større overflate kan man enkelt trekke ut den integrerte platen.

Vedlikehold:

Noen væsker som kan forårsake misfarging (kaffe, te etc) anbefales det å tørke opp væsken slik at det ikke tørker på overflaten.

Nattbordet har glatte, rene overflater for enkel rengjøring. Topplaten og den uttrekkbare platen kan tas av for rengjøring. Nattbordet er laget for sykehjems-og institusjonsmiljø, og tåler godt rengjøring som er nødvendig/hensiktsmessig for disse miljøene, inkludert desinfisering/rengjøring med sprit.