

Molift Quick Raiser sandaler

molift[®]
by Etac

SV - Svensk bruksanvisning

BM04604 Rev. A 2024-12-09



Svensk bruksanvisning

Innehåll

Viktigt.....	1
Om Molift Quick Raiser sandaler.....	2
Montering av Molift Quick Raiser-sandaler.....	2

Viktigt

Denna handbok innehåller viktiga säkerhetsanvisningar och information om hur lyften och dess tillbehör ska användas.

I den här handboken är brukaren den person som lyfts. Assistenten är den person som hanterar och styr lyften.



Varning!
Denna symbol indikerar särskilt viktig säkerhetsinformation. Följ dessa anvisningar nogt.



Läs igenom manualen innan du börjar använda lyften!
Det är viktigt att du förstår innehållet i handboken fullt ut innan du försöker använda utrustningen.

Ladda ned dokumentation på www.etac.com så att du garanterat har den senaste versionen.

Deklaration og garanti



CE-märkning

Produkten och de tillbehör som beskrivs i denna bruksanvisning överensstämmer med förordning (EU) 2017/745 av den 5 april 2017 som medicinteknisk produkt, riskklass I. Alla allvarliga incidenter som inträffar och som är relaterade till produkten ska rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten i det medlemsland där användaren och/eller patienten bor.



Garantimeddelande

Två års garanti mot defekter i utförande och material i våra produkter. Ett års garanti på batterier. Se www.etac.com för villkor.

Molift Quick Raiser sandaler

Om Molift Quick Raiser sandaler

Molift Sandals är utformade för att användas tillsammans med Molift Quick Raiser.



Läs bruksanvisningen noga innan du använder lyften med tillbehör. Alla säkerhetsföreskrifter gäller.




Sandaler är endast avsedda för mindre stöd för brukarens fötter. Brukaren måste ha full kontroll över benrörligheten.

Sandalerna levereras med kardborreband monterat på undersidan.



Montering av Molift Quick Raiser sandaler

Ta bort halkskyddstejpen från Quick Raiser som sandalerna ska monteras på.

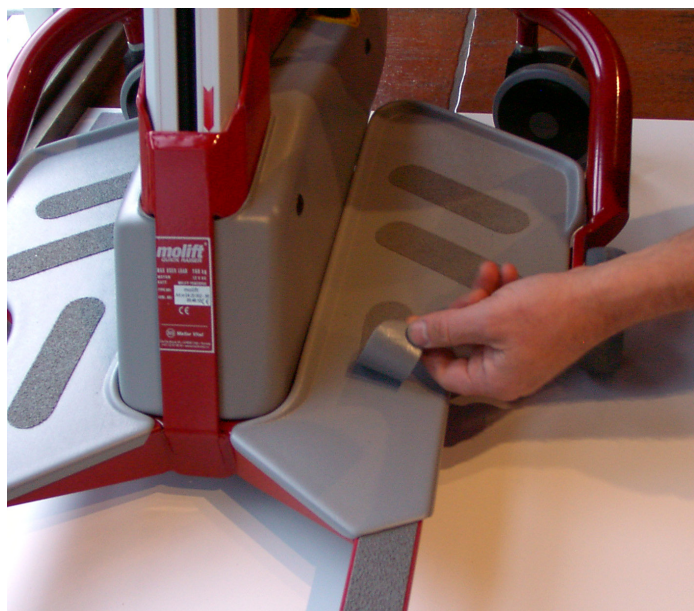

Ta bort tejpens från kardborrebandets undersida på sandalerna.



Placera sandalerna på chassit. Positioneringen kan variera för olika brukare.



Molift Quick Raiser sandaler

Placera den andra sandalen på motsatt sida. Tryck båda sandalerna mot chassit för att säkerställa att de sitter fast ordentligt.

Sandalerna kan tas bort och bytas ut, endast kardborrbandets hårda sida sitter kvar på Molift Quick Raiser-chassi.



Sandalerna är nu klara att användas.



Etac A/S
Parallevej 3
DK-8751 Gedved
www.etac.com

molift[®]
by Etac